



Baby-S - Manuel d'utilisation

1

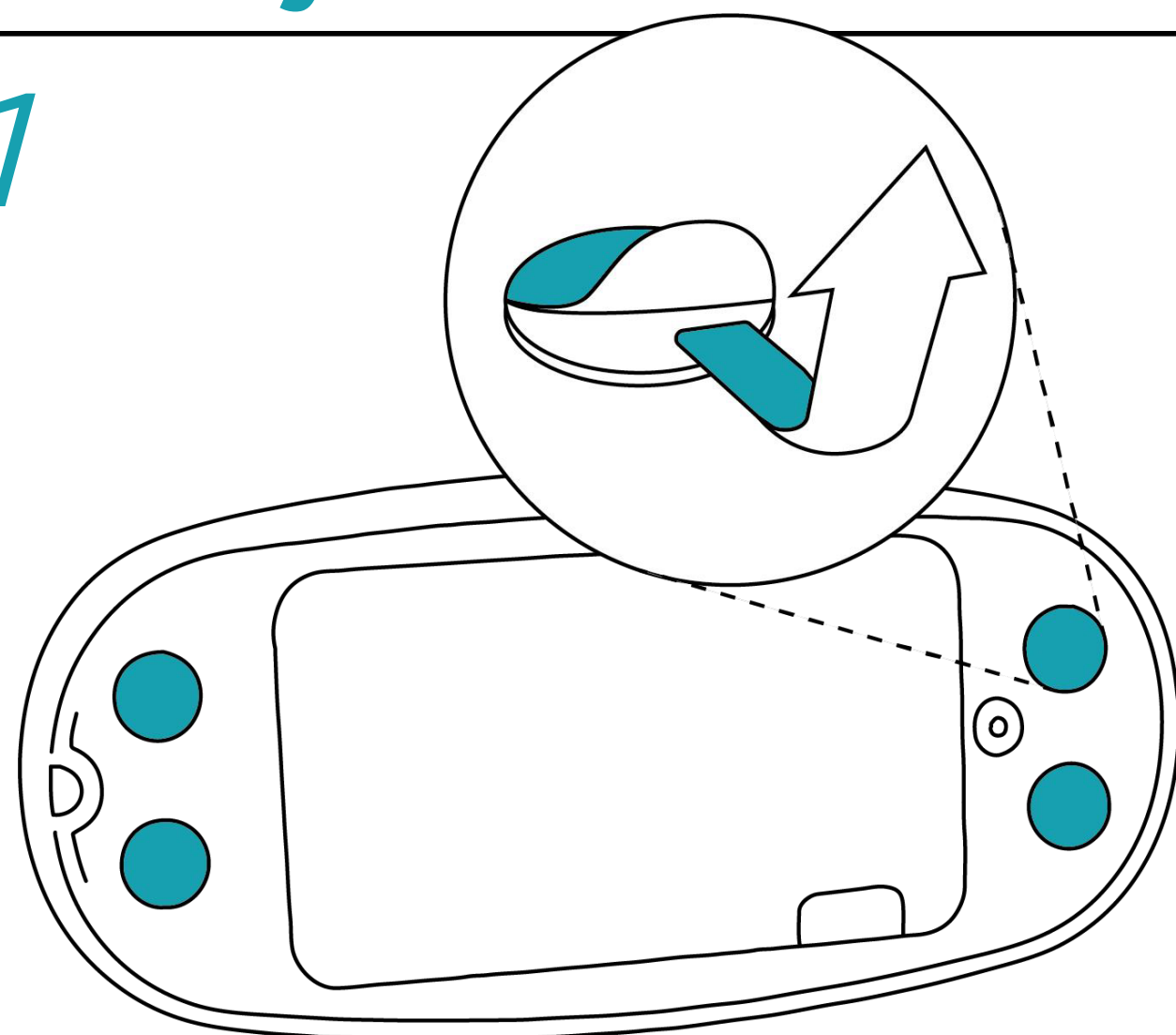


Pour fixer l'appareil, décollez les pellicules des patins.

2

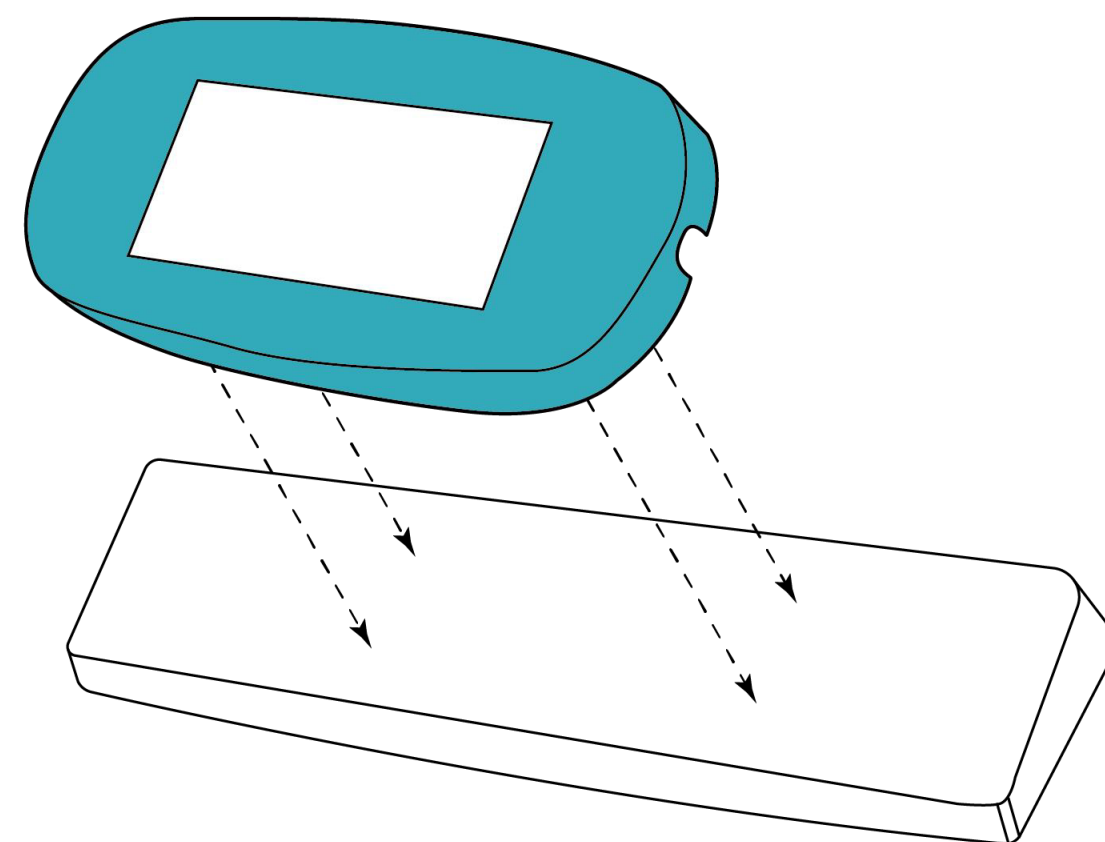


Appliquez les patins adhésifs sur son support.

3

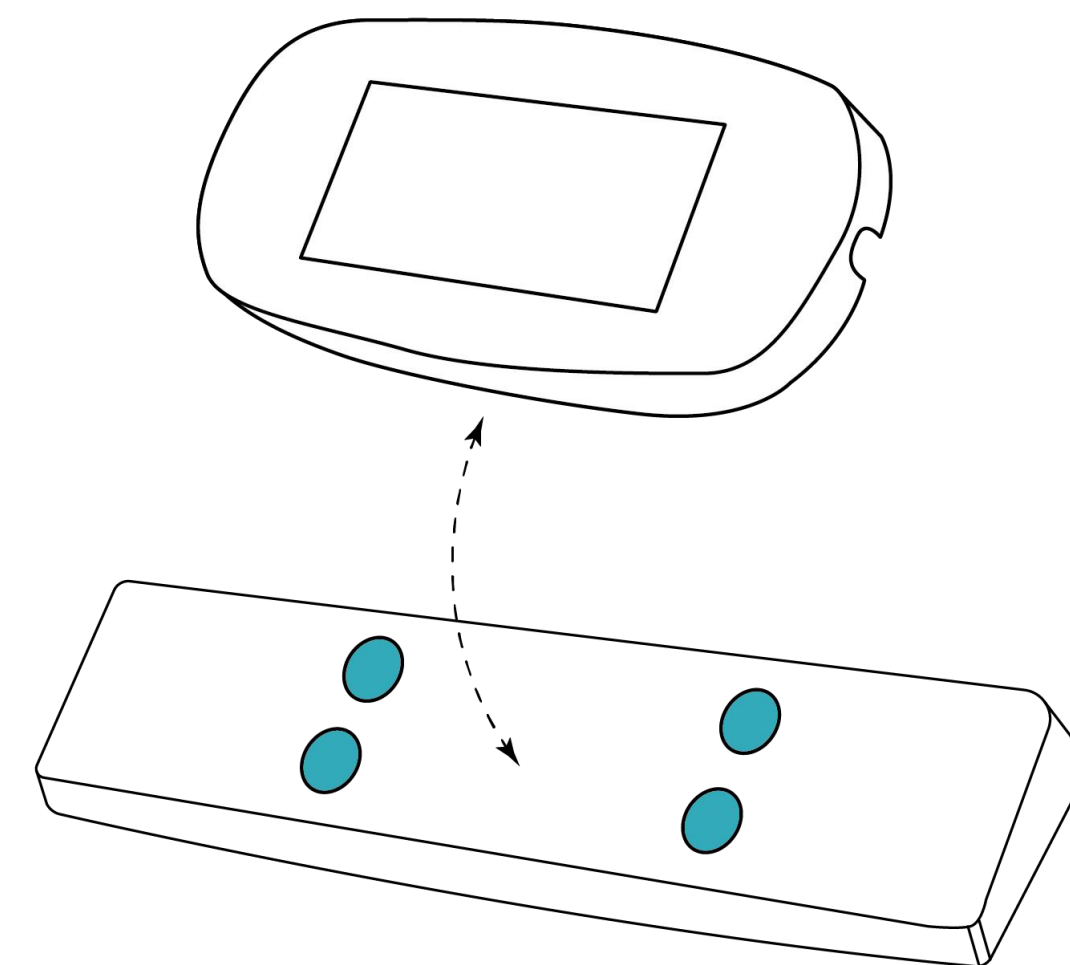


Fixez ou retirez facilement l'appareil de son support.

4

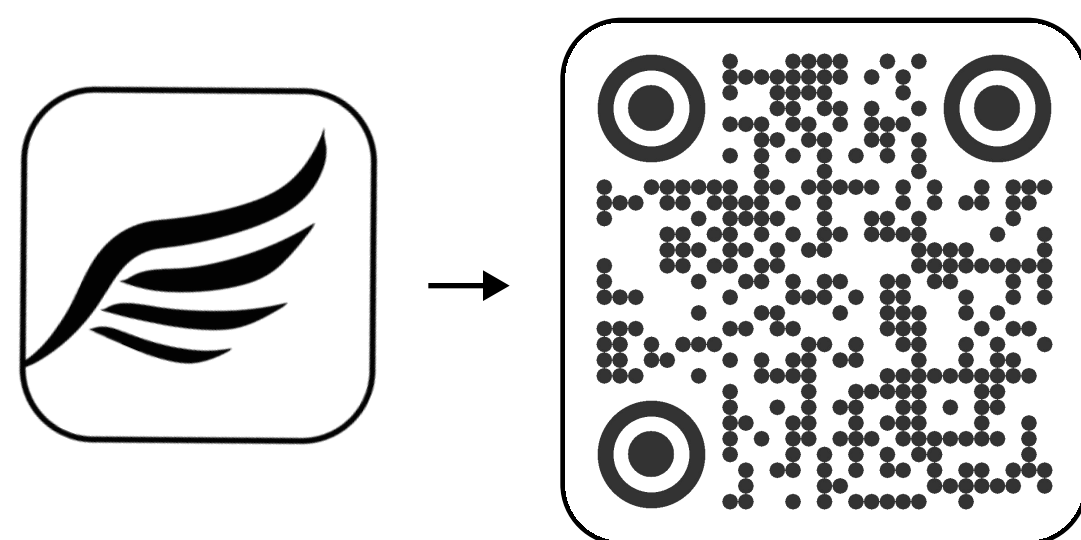


Téléchargez l'application Innov2Learn sur l'App Store, le Play Store, ou via notre site web : innov2learn.ca/app/

5

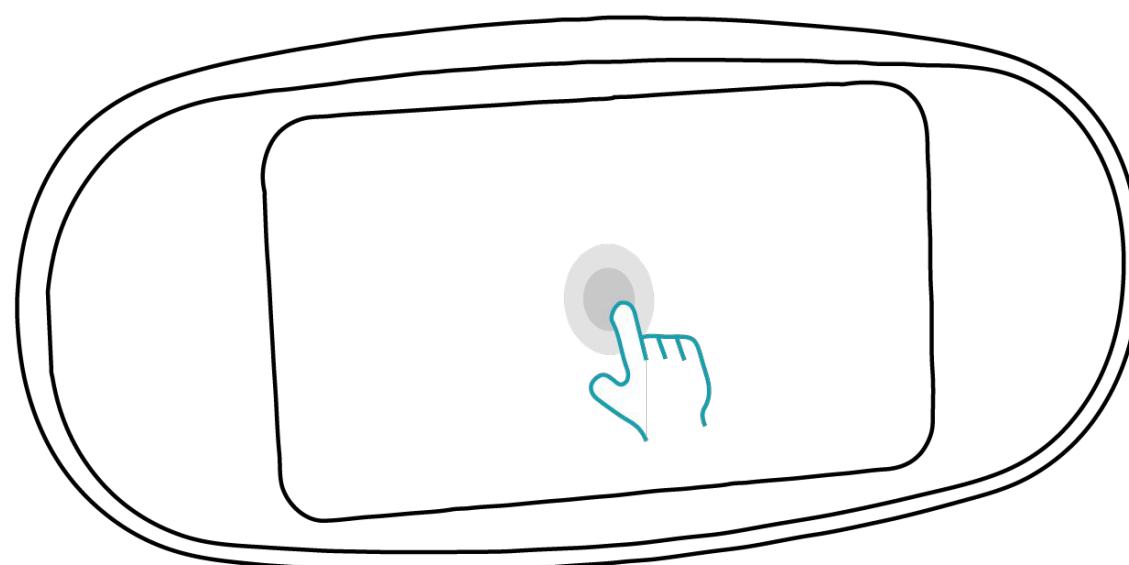

Appuyez 2 fois sur l'écran pour allumer l'appareil.

6

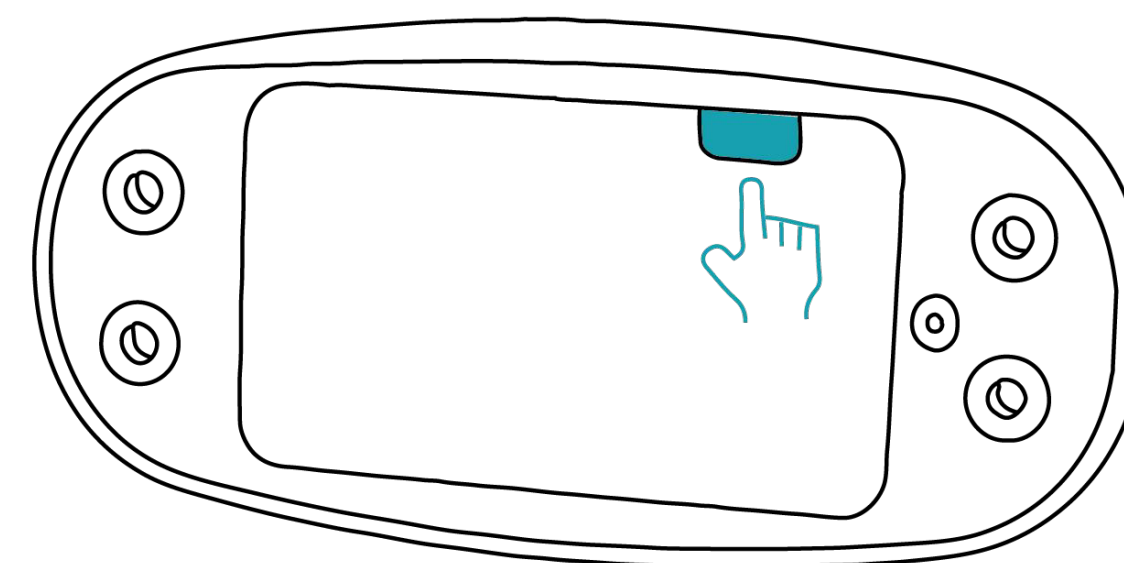



Si l'appareil est totalement déchargé, maintenez le bouton situé à l'arrière enfoncé après l'avoir rechargé.

7




Ouvrez l'application Innov2Learn.

8

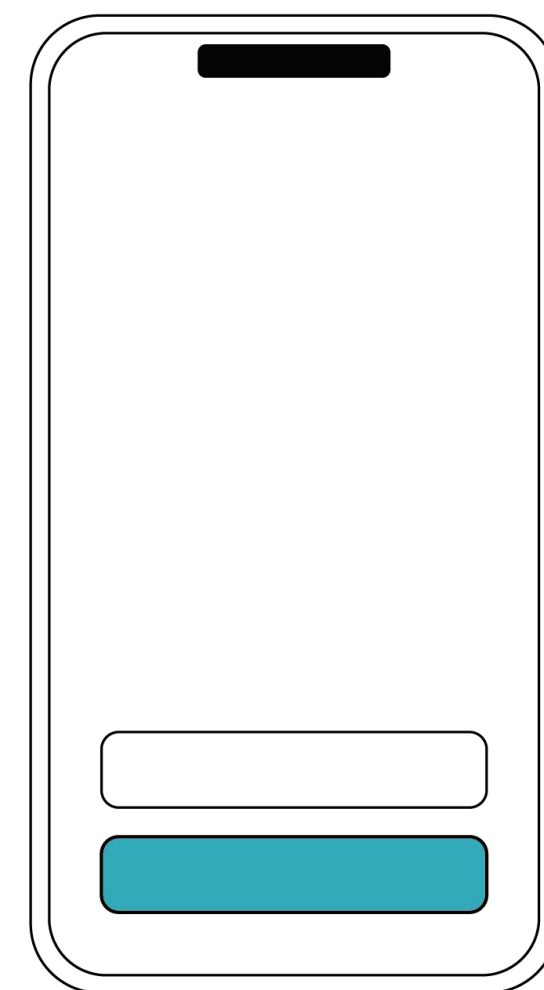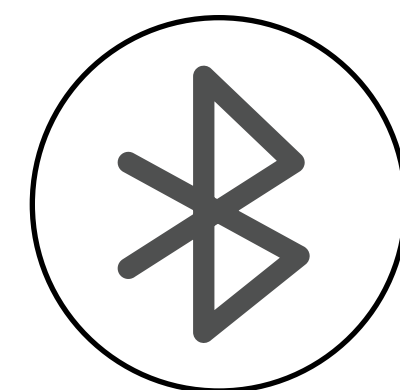


Activez le Bluetooth et cliquez sur connecter

9

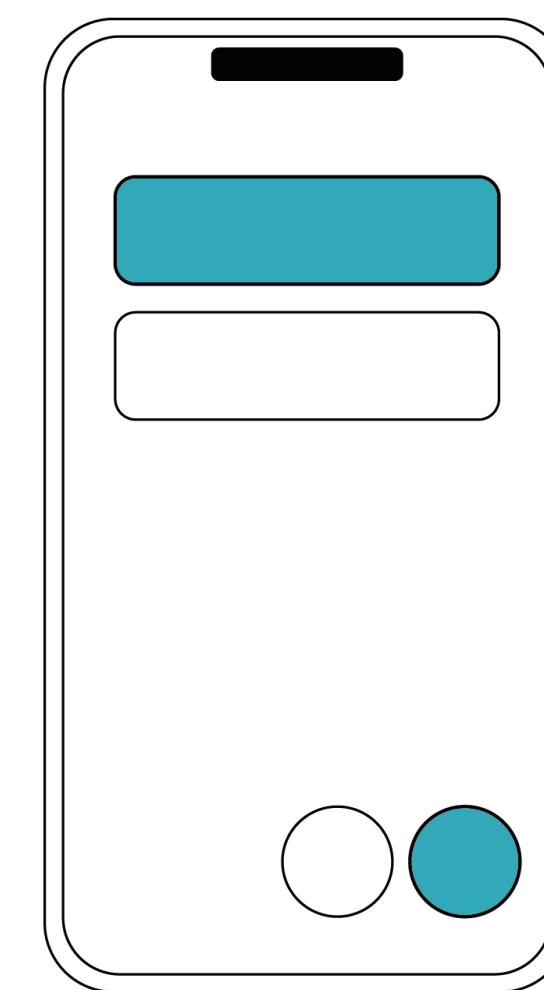

Sélectionnez l'appareil et appuyez sur le bouton d'appareillage.

10

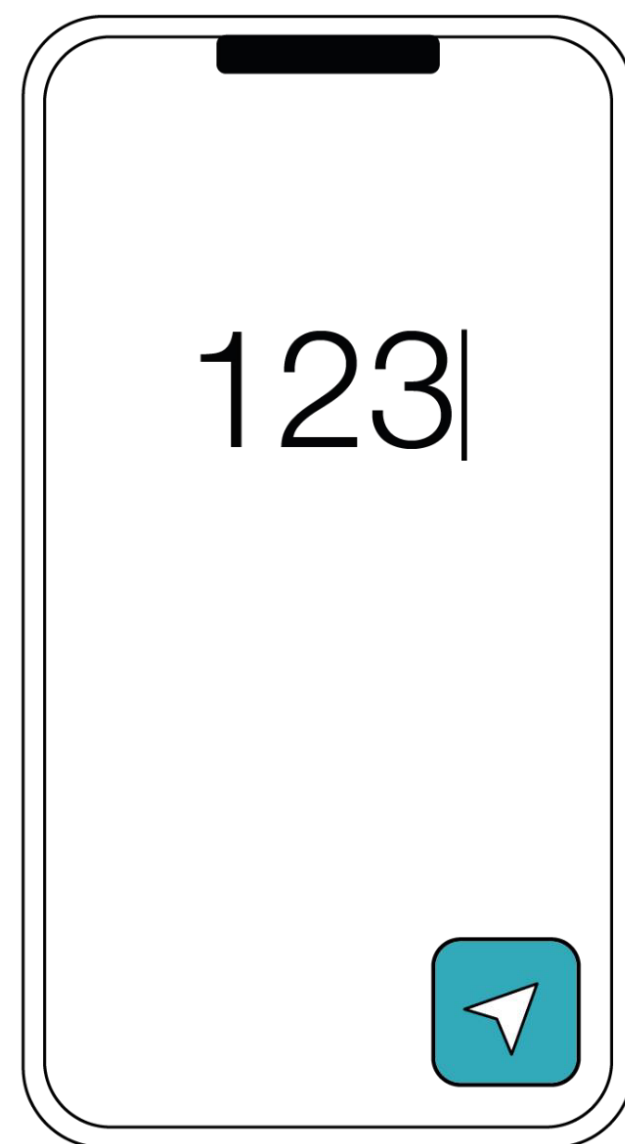

Commencez votre simulation.

