

① Téléchargez l'application Innov2learn

- Depuis le Play Store ou l'App Store.

② Allumez l'appareil

- En appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que quelque chose apparaisse à l'écran.*
- Pour l'OXI, une simple pression sur le bouton d'alimentation suffit.

** Veillez à débrancher l'appareil avant de l'utiliser.*

③ Activez le Bluetooth

- Accordez toutes les autorisations demandées par l'application.
- Ouvrez l'application & cliquez sur "connecter".


④ Sélectionnez

- Les appareils que vous souhaitez connecter.
- Une fois l'appareil surligné en vert, cliquez sur l'icône chaîne en bas à droite pour sécuriser la connexion.

⑤ Commencez votre simulation

- Programmez une lecture (mode Préréglage) pour la gamme Gluco, Oxi, le Forehead-T et la gamme Thermo si équipée du Thermo SP Trigger) si aucune détection n'a été détectée. Finalisez l'enregistrement de la valeur en cliquant sur "Préréglage".
- Pour les lectures en temps réel (lorsqu'il y a une détection, ou pour le CO2-Detect, SpotV II et la gamme Thermo SANS le Thermo SP Trigger), envoyez directement les valeurs saisies en sélectionnant l'icône d'envoi.


① Téléchargez l'application
Innov2Learn

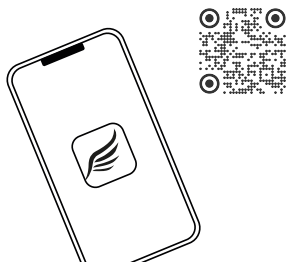


② Allumez l'appareil



③ Activez le Bluetooth

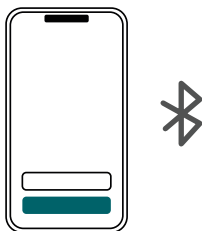

④ Sélectionnez

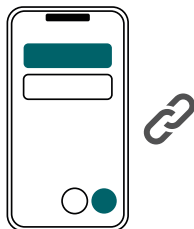

⑤ Commencez votre simulation

