



SP Thermo Trigger - Manuel d'utilisation

1

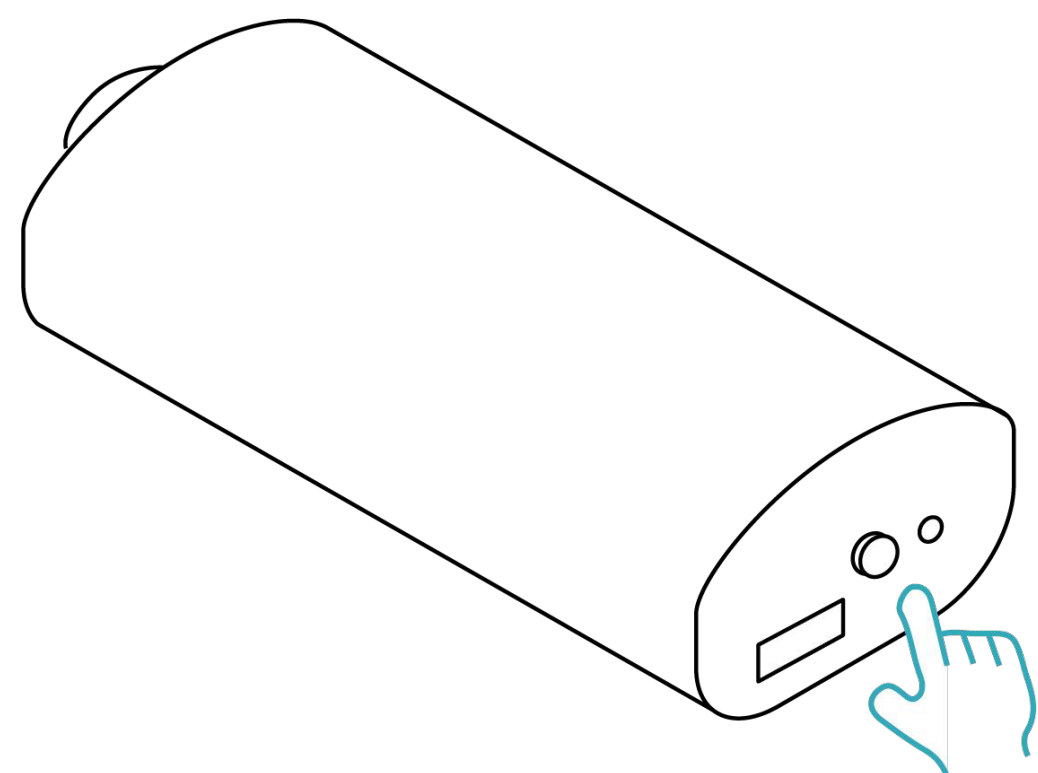


Allumez le SP Thermo Trigger en appuyant sur le petit bouton d'allumage situé à côté du port de recharge.

2

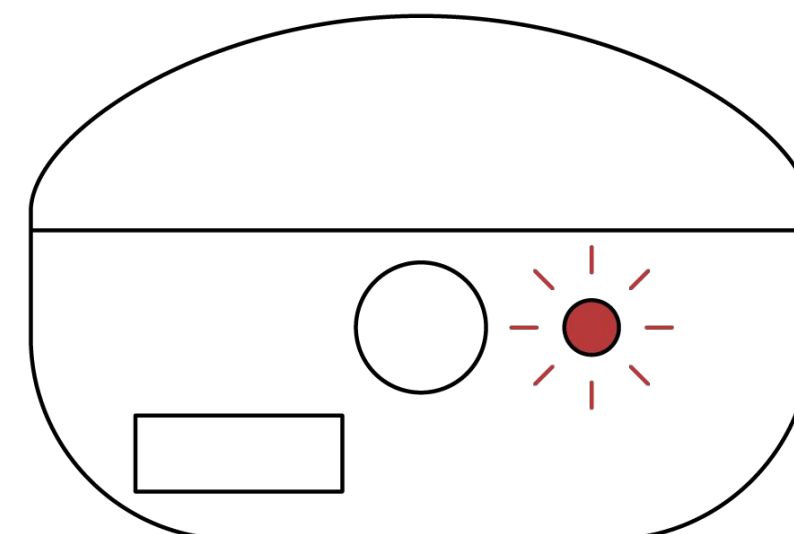


La LED rouge s'allume lorsque l'appareil est activé.

3

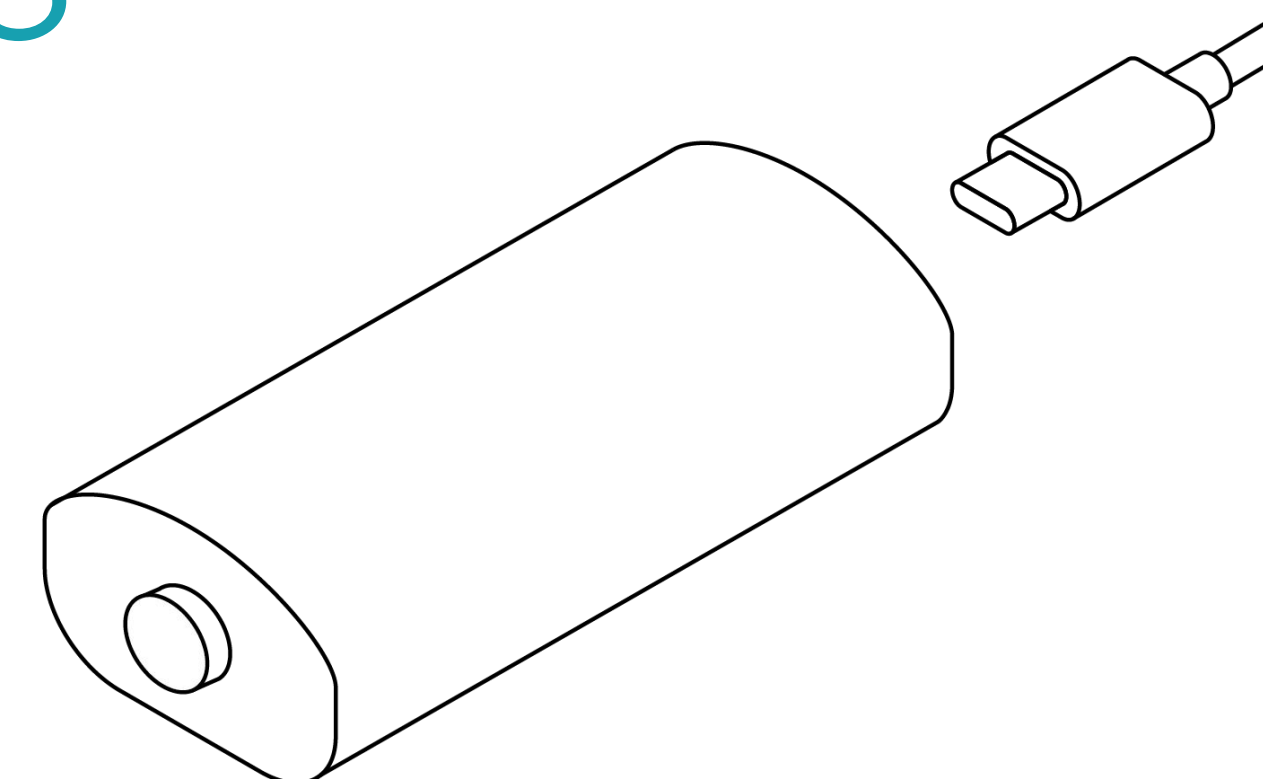

Rechargez le SP Thermo Trigger via le port USB-C.

4

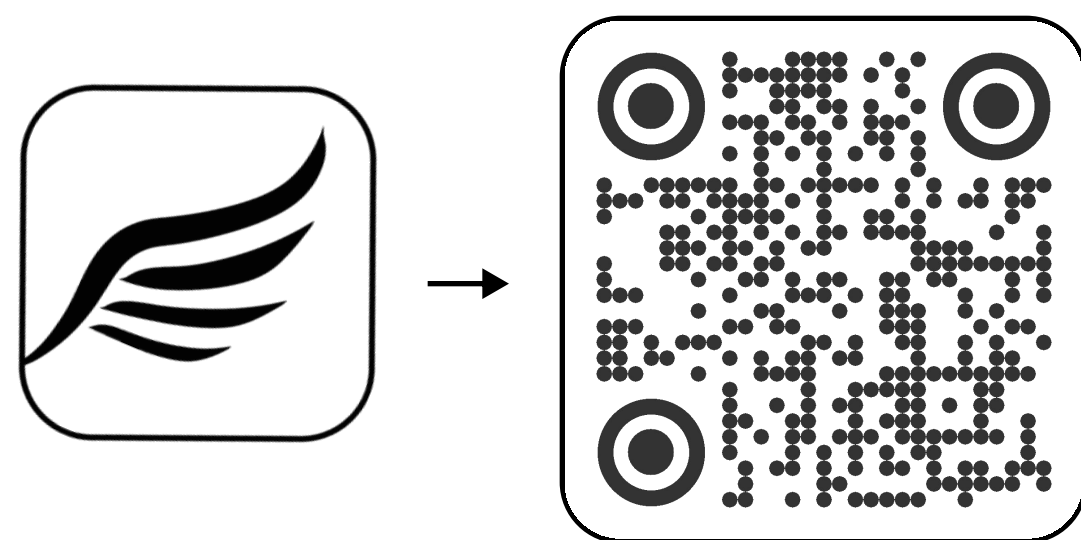



Téléchargez l'application Innov2Learn sur l'App Store, le Play Store, ou via notre site web : innov2learn.ca/app/

5



Ouvrez l'application Innov2Learn.

6

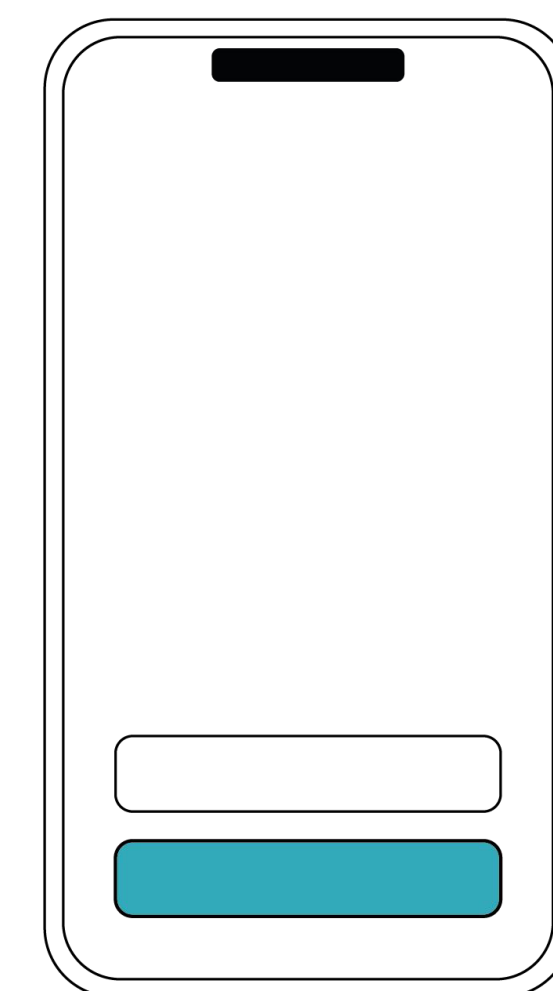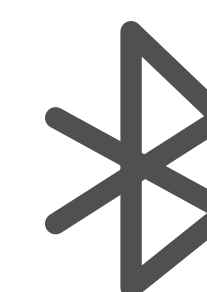

Activez le Bluetooth et connectez au préalable l'appareil que vous souhaitez utiliser avec le SP Thermo Trigger.


SP Thermo Trigger - Manuel d'utilisation

7




Une fois connecté au Thermo ou au SpotV II, cliquez sur « Connect to probe ».

8

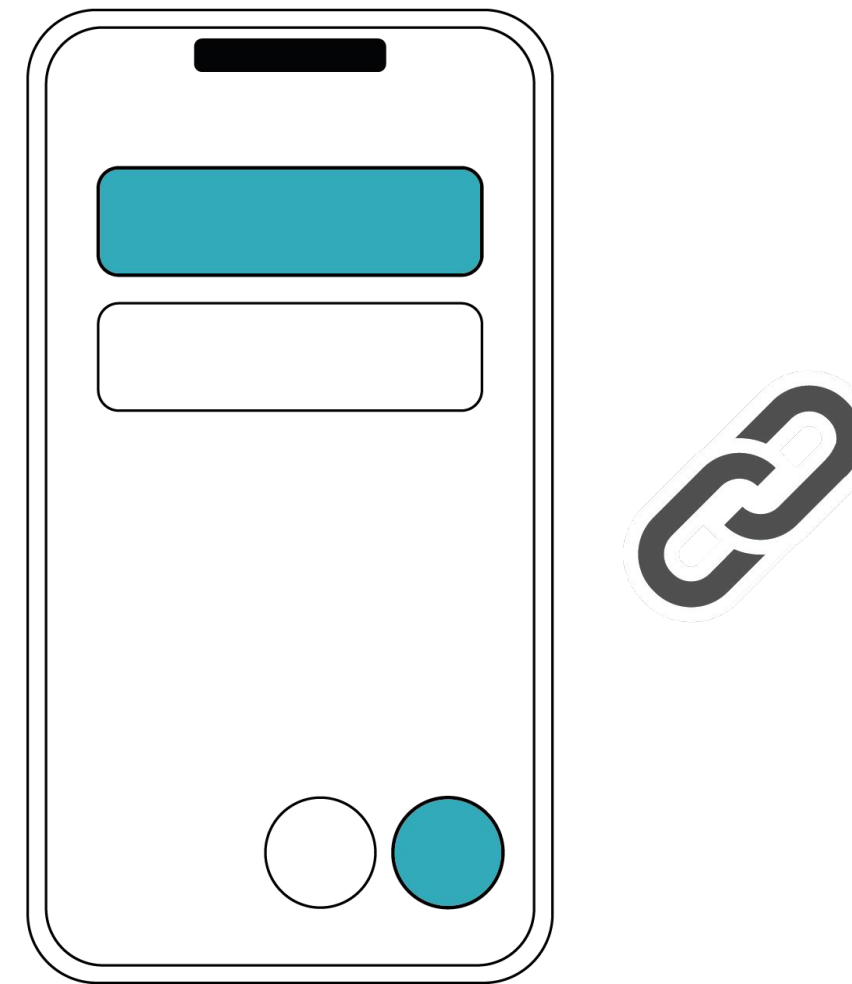




Apparez et sécurisez la connexion du SP Thermo Trigger.

9

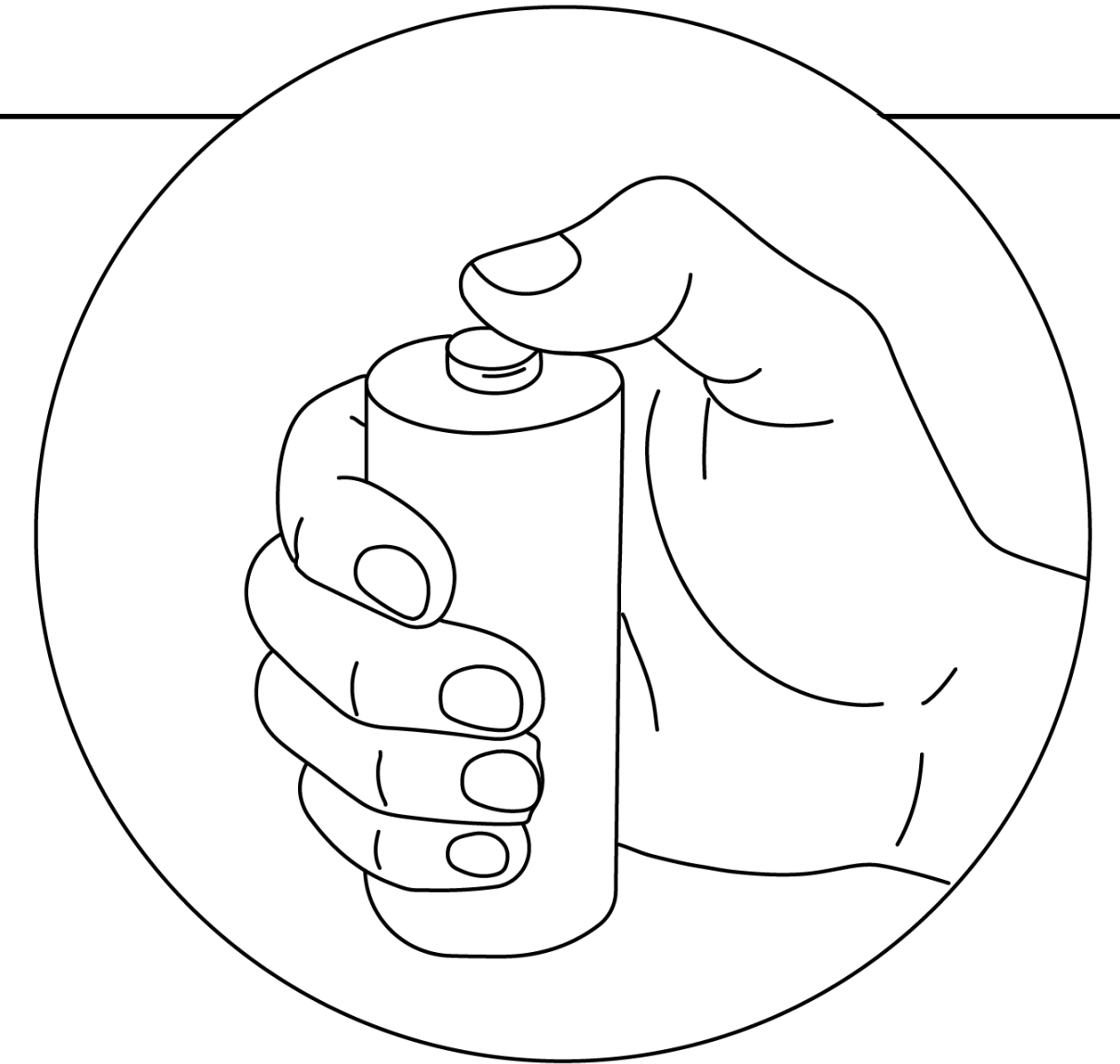

Au moment souhaité, appuyez sur le bouton de l'appareil pour activer la détection dans l'application.

10

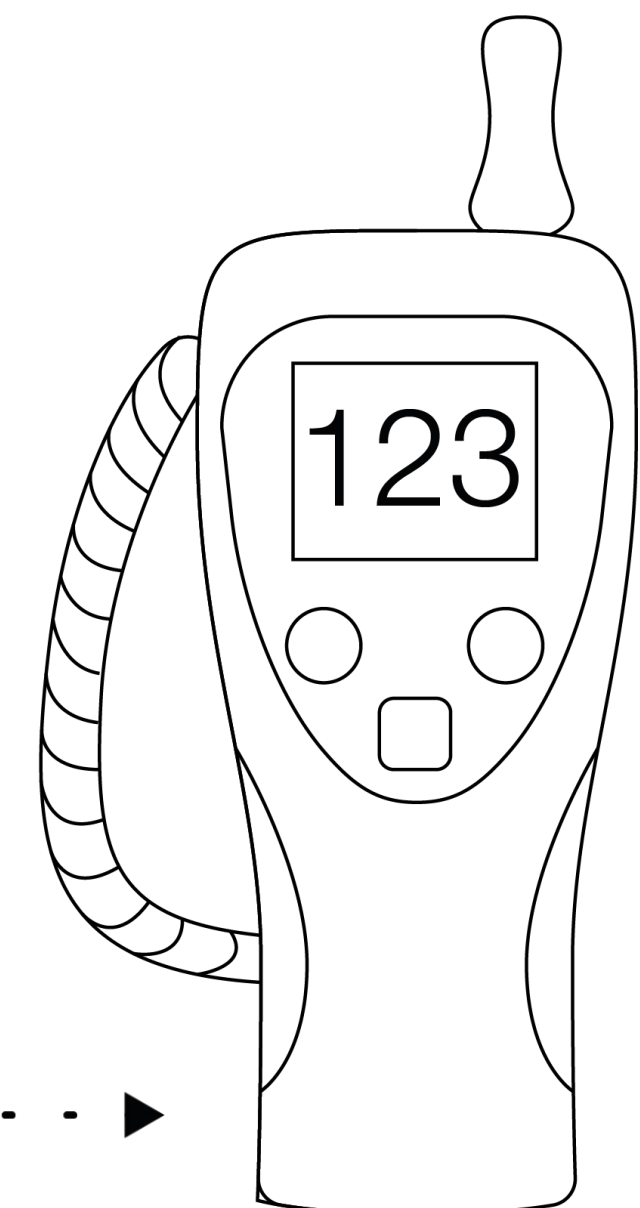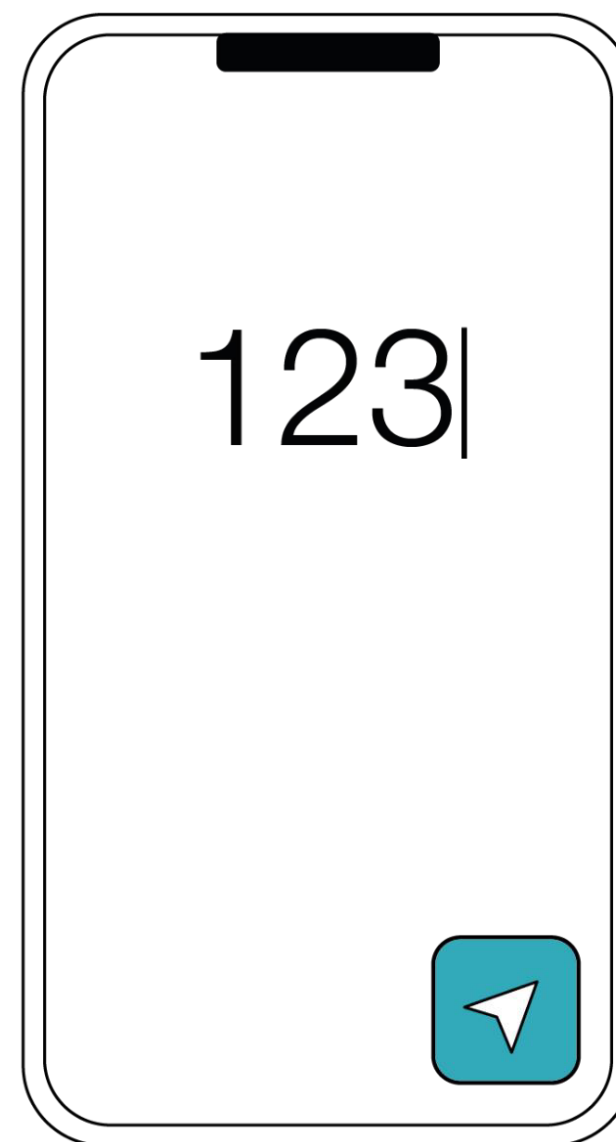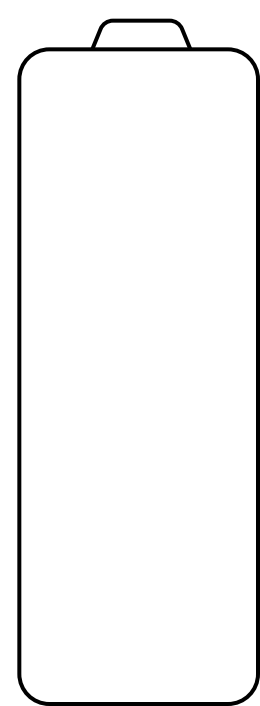

Commencez votre simulation.