


Votre kit audio multifonction, conçu spécifiquement pour vos scénarios de formation!

Comprenant un changeur de voix avec micro, un haut-parleur miniature et un écouteur subtil à connexion sécurisée.

Le tout, utilisé au moyen la fonctionnalité VoiceQast®, disponible directement à partir de l'application mobile d'Innov2Learn®.

CONTENU

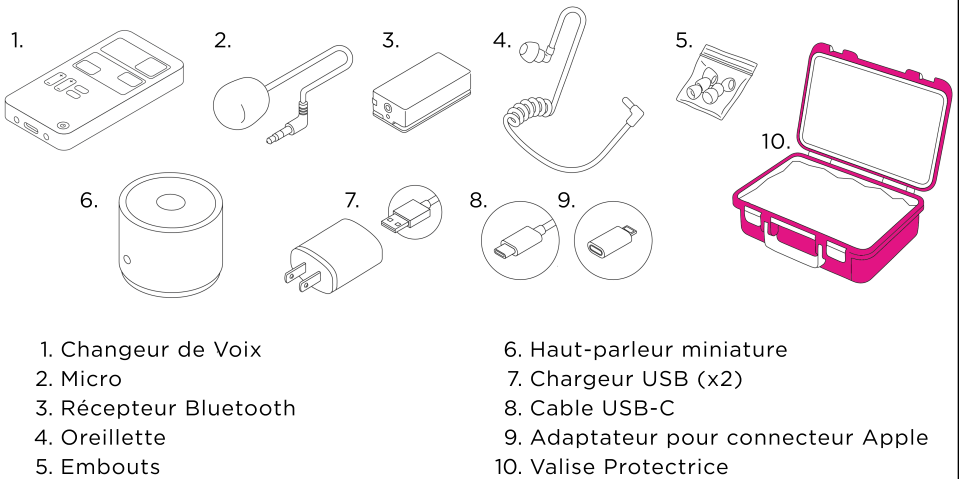

UNE COMMUNICATION AMÉLIORÉE




Terminé les limitations en simulation!



Vos patients standardisés pourront désormais recevoir des instructions additionnelles de façon sécurisée et claire grâce à l'oreillette.



Plus besoin de vous forcer à moduler votre voix, car vous aurez le changeur de voix pour cela! Une voix enfantine, masculine ou féminine; c'est votre choix!

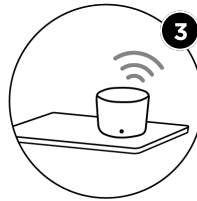


Diffuser des codes de couleur dans n'importe quelle salle!

VOICEQAST

VoiceQast est intégrée directement à l'application gratuite Innov2Learn.

Téléchargez l'application sur l'App Store ou le Play Store, ou via notre site web :

innov2learn.ca/app/

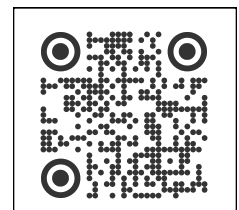

GUIDE VISUEL POUR LE BRANCHEMENT




CHANGEUR DE VOIX

Permet de donner la voix souhaitée à vos mannequins en temps réel (enfant, bébé, genre masculin ou féminin, etc.). Vous parlez directement dans le micro qui y est connecté.

Mise en route

1. Branchez un micro dans l'entrée marquée MIC.
2. Connectez la sortie audio dans le port VOICE OUT. (tablette, cellulaire)
3. Allumez l'appareil : il est actif dès qu'il est alimenté (câble USB-C).

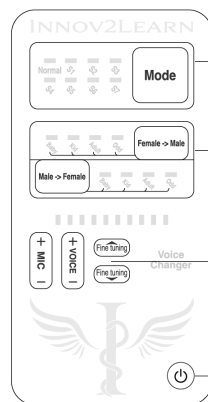

Fonctionnalités


- **MODE** : Permet de déplacer le curseur pour le ramener au mode normal.
- **FEMALE → MALE / MALE → FEMALE** : Applique directement l'effet de transformation d'une voix masculine vers féminine, ou l'inverse.
- **FINE TUNING** : Permet d'ajuster l'effet audio.
- **ALLUMER/ÉTEINDRE**

RÉCEPTEUR BLUETOOTH

Permet de transmettre discrètement la voix de l'instructeur au participant, via une oreillette reliée au récepteur Bluetooth.


Mise en route

1. Allumer : appuyer trois secondes jusqu'à ce que le bouton s'allume en bleu.
2. Pairage : Appuyer trois secondes jusqu'au clignotement (sélectionner « Qudelix » sur votre cellulaire ou Tablette à partir de la liste de dispositifs Bluetooth disponible).
3. Brancher l'oreillette dans le récepteur.

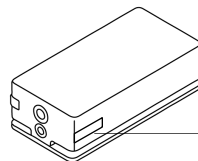


- Volume réglable via les boutons rouges (+ / -) du récepteur.

Communication unidirectionnelle sécurisée (du formateur au participant).

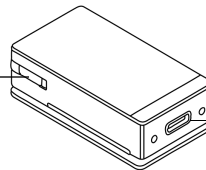

- Charger avec un câble USB-C

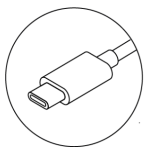


HAUT-PARLEUR MINIATURE

La « nouvelle » voix de vos mannequins et/ou votre nouveau système portable de diffusion d'annonces.

Mise en route

1. Appuyer deux secondes pour allumer/éteindre.
2. Pairage : Maintenir appuyé le bouton jusqu'au clignotement bleu, puis sélectionner « EWA » depuis la liste des dispositifs Bluetooth visibles à partir de votre cellulaire ou tablette;

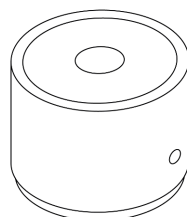

- Lumière rouge : Charge
- Lumière éteinte : Chargement complété
- Lumière clignotante bleue : Pairage
- Lumière bleu : Connection confirmée

- Charger avec un câble USB-C

