


Maîtrisez la technique de piqûre au bout du doigt avec un stylo autopiqueur simulé, sans aiguille, produisant des gouttes de sang artificiel ultra-réalistes.

Sur pression du bouton, une petite goutte de sang artificiel est expulsée du dispositif.

Ce kit sans aiguille est conçu pour une utilisation avec des patients standardisés et des mannequins. Le sang artificiel inclus est facilement lavable et ne tache pas, même sur les mannequins haute-fidélité.



CONTENU DU KIT

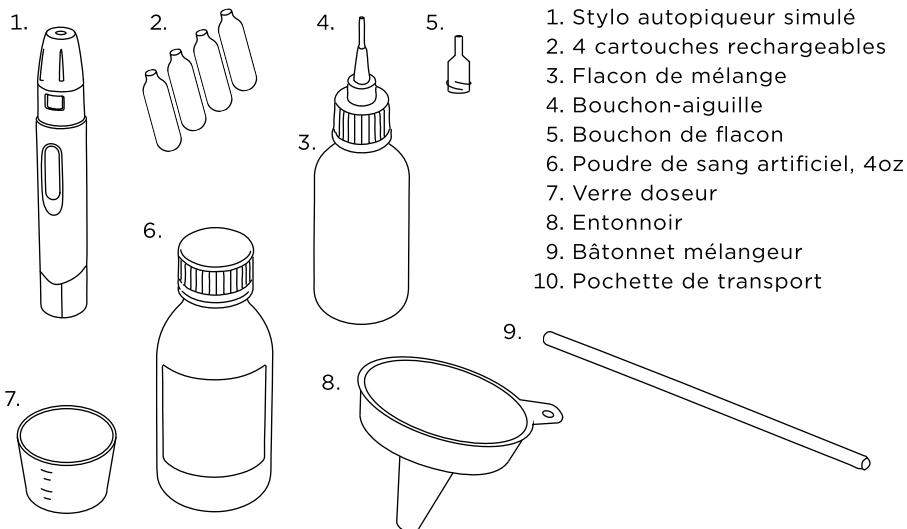

PRÉPARATION DU SANG ARTIFICIEL

La poudre fournie (4oz) permet de préparer jusqu'à 2 litres de sang artificiel.


1. À l'aide du verre doseur, mesurer **10 ml** de poudre. Placer l'entonnoir sur le flacon de mélange, puis verser la poudre dans le flacon.
2. Remplir le flacon d'eau tiède jusqu'à la ligne de remplissage (là où le flacon commence à se rétrécir).
3. Mélanger soigneusement à l'aide du bâtonnet jusqu'à dissolution complète de la poudre.
4. Fermer le flacon avec le bouchon-aiguille.

→ Le sang artificiel est prêt à l'emploi. À utiliser dans les quelques jours suivant la préparation. À conserver au réfrigérateur.

PRÉPARATION DU STYLO AUTOPIQUEUR




Le dispositif est livré avec une cartouche déjà en place. Vous pouvez soit la remplir directement, soit remplir une cartouche de rechange et l'installer à l'aide du bâtonnet mélangeur.

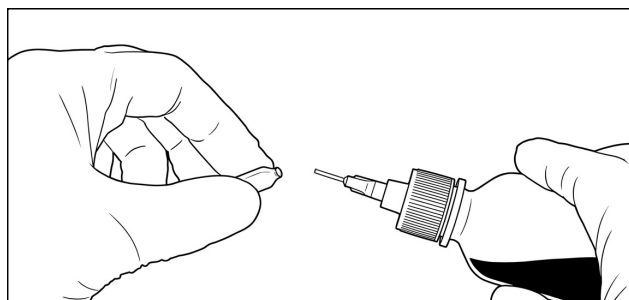

A - Remplissage et remplacement d'une cartouche


1. Insérer le bouchon-aiguille du flacon dans une cartouche de rechange et la remplir jusqu'aux 3/4.
2. Ouvrir le capuchon supérieur du dispositif et retirer la cartouche vide à l'aide du bâtonnet mélangeur.
3. Insérer la cartouche pleine à l'aide du bâtonnet en veillant à ce que le rebord de la cartouche passe bien dans l'orifice prévu. Refermer le dispositif.

A -

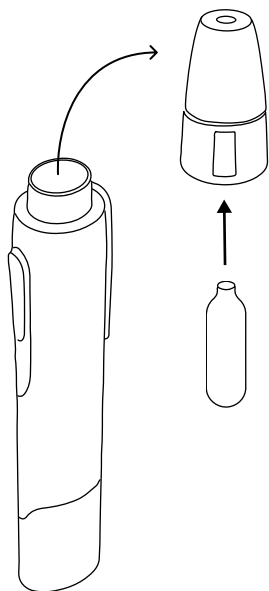

B - Remplissage de la cartouche en place

1. Insérer le bouchon-aiguille du flacon dans l'orifice situé à l'extrémité du dispositif.
2. Remplir la cartouche jusqu'à ce qu'elle soit presque pleine.

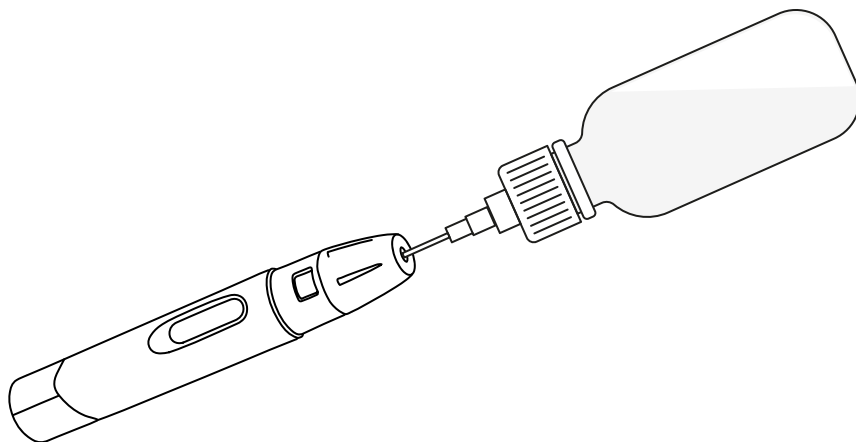

UTILISATION DU STYLO AUTOPIQUEUR

1. Vérifier que la cartouche est bien remplie.
2. Tirer le capuchon arrière vers l'arrière jusqu'au déclic pour armer le dispositif.
3. Appliquer délicatement la tête du stylo sur la surface cutanée.
4. Appuyer sur le bouton latéral. Une petite goutte de sang artificiel apparaît.
5. Pour produire une nouvelle goutte, tirer à nouveau le capuchon arrière pour réarmer le dispositif et répéter l'opération.

