
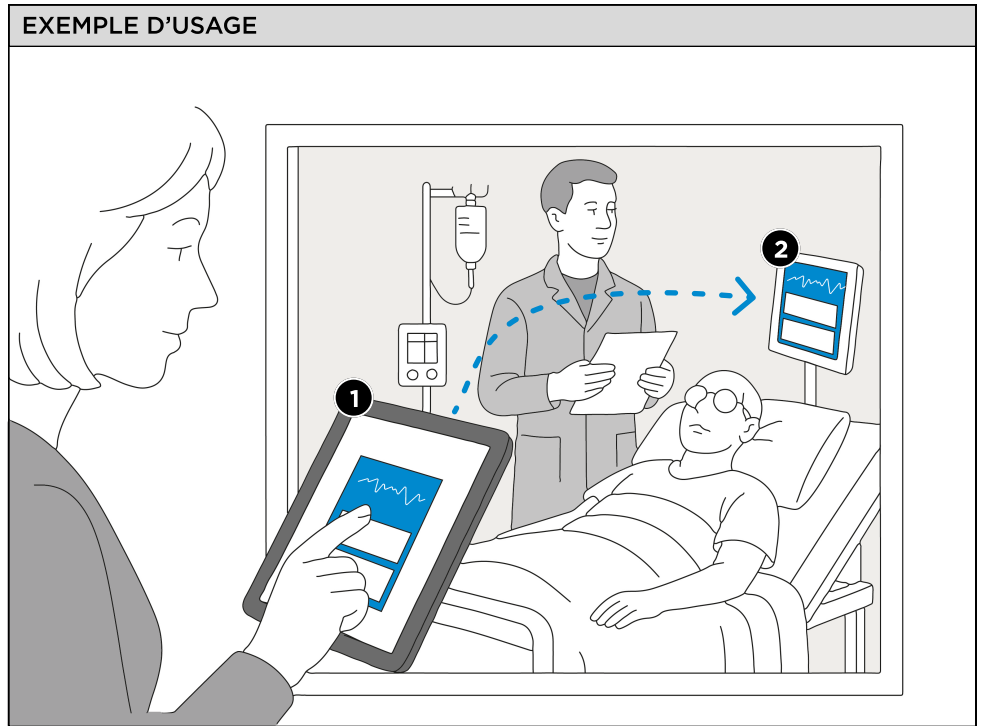


Le simulateur de moniteur de la fonction cérébrale.

Ce dispositif vous permet d'améliorer le réalisme lors de vos formations SIM POC.

- ❶ Envoyez les informations depuis l'application Innov2Learn de façon simple, personnalisée et instantanée !
- ❷ Les informations s'afficheront sur l'écran du Sed-A, pour un réalisme inégalé de vos simulations.


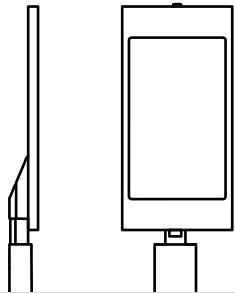


Le simulateur unique pour visualiser, enseigner et optimiser l'anesthésie en temps réel.

MISE EN ROUTE




innov2learn.ca/app/

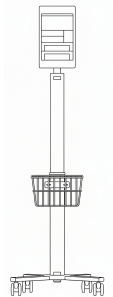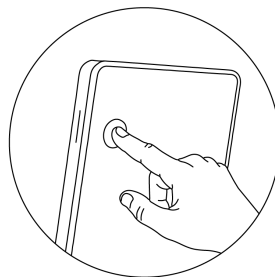


1. Téléchargez l'application Innov2Learn sur l'App Store, le Play Store, ou via notre site web.

2. Allumez le Sed-A à l'arrière du support de la tablette.


3. Sur la tablette, ouvrez l'application Sed-A, ou bien l'application s'ouvre d'elle-même au bout de 1 minute.

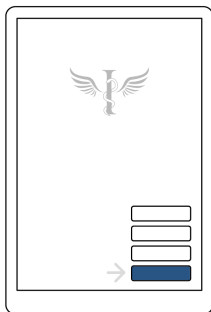

4. Sur l'application Innov2Learn, appuyez sur le bouton *Connect*.

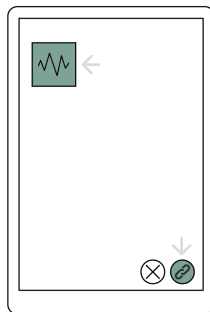


5. Sélectionnez l'appareil en haut à gauche, puis appairez en bas à droite.

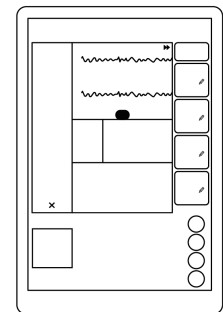

6. Une fois l'appareillage effectué, contrôlez à distance l'affichage du Sed-A et donnez vie à vos simulations !


INTERFACE DE CONTRÔLE

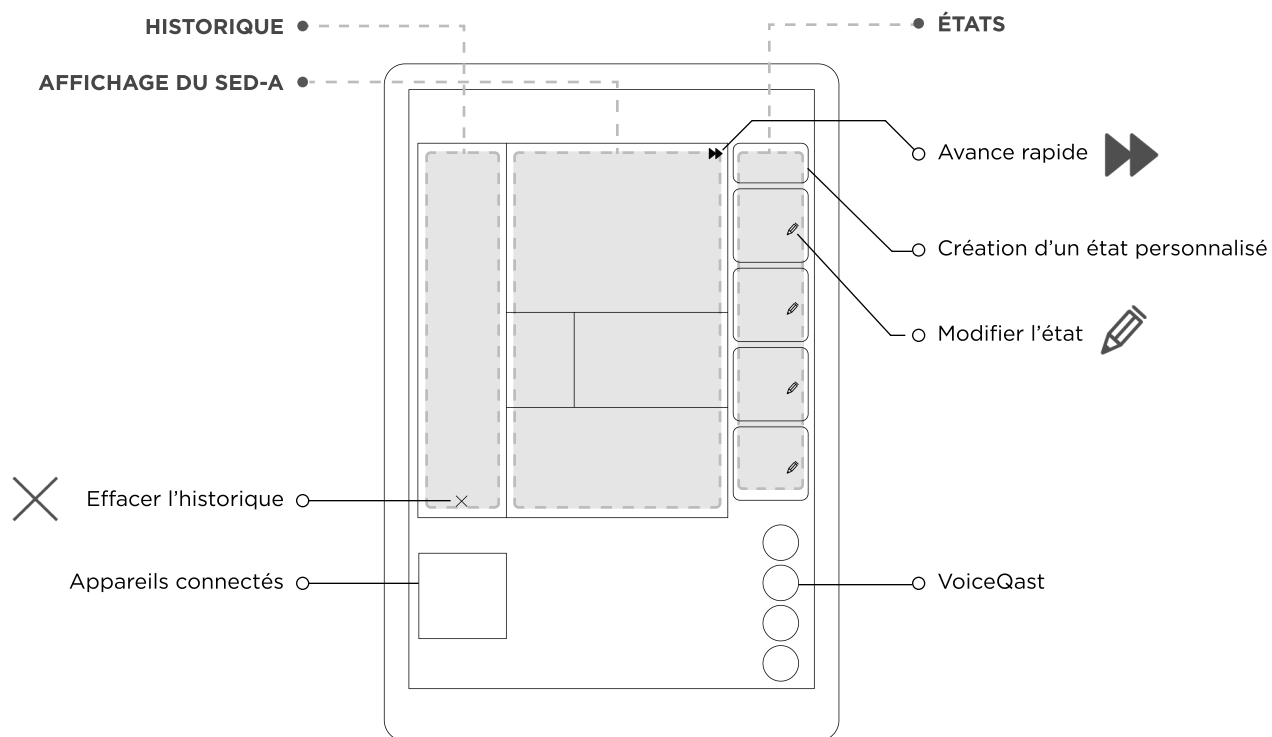


ENVOYER & MODIFIER UN ÉTAT



- Cliquez sur un état pour l'envoyer sur le Sed-A.

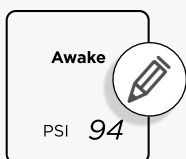

- Modifiez l'état comme vous le désirez

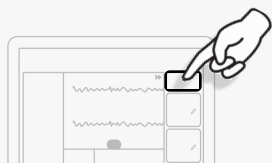

- Créer un état personnalisé.



- Envoyez l'état

Save As

Save

- Enregistrez vos états pour les réutiliser plus tard.

